

كيف "إلى تنظيف الأدوات الجراحية" أخذ الوقت بشكل صحيح لتنظيف وتعقيم الأدوات الجراحية أمر حتمي في ضمان المرضى لا يحصلون على الإصابات أو غيرها الأمراض دوماً ارتداء قفازات واقية العباءات ودروع الوجه (التنظيف اليدي المنقولة (أو نظارات وأغطية الرأس

1. لصكوك فوراً بعد الاستخدام شطف ا

استخدام فرشاة فرك تحت المياه الجارية لإزالة جميع الدم-2  
والأنسجة على الأسطح وفي المفاصل

3. المنظفات إنزيم" من 1/4 مزيج في بالوعة أو حوض، أوقية .  
تغمر .سوبر تركز الجالون من الحار للمياه الساخنة-"الطبيبة  
قد .الصكوك في الحل، وتسمح بامتصاص لمدة دقيقتين على الأقل  
يلزم وقتاً أطول للدم المجفف على والتربة العضوية

4. فرك الصكوك مع فرشاة أو الأسفنج-

5. شطف الصكوك تحت سطح الماء، تعقيم المياه إذا كان متوفراً، والسماح الجافة .