

COMO a limpo instrumentos cirúrgicos tomar o tempo para limpar e esterilizar instrumentos cirúrgicos corretamente é imperativo garantir pacientes não recebem infecções ou outras doenças transmitidas.

Lavagem a manual (sempre desgaste luvas, vestidos, escudos de rosto ou óculos de proteção e revestimentos de cabeça)

1. Lave instrumentos imediatamente após o uso.
2. Use uma escova em água corrente para remover todos os sangue e tecidos nas superfícies e nas articulações.
3. Em um coletor ou bacia, Oz. mistura  $\frac{1}{4}$  de médicos detergente enzimático – Super concentrar-se pelo galão do quente para água quente. Submergir os instrumentos para a solução e deixar de molho pelo menos 2 minutos. Mais tempo pode ser necessário para solos orgânicos e secas no sangue.
4. Esfregue os instrumentos com um pincel ou uma esponja.
5. Lavar os instrumentos debaixo de água, estéril de água se estiver disponível e deixar para secar.