

Cómo a limpio instrumentos quirúrgicos tomarse el tiempo para limpiar y esterilizar instrumentos quirúrgicos correctamente es imprescindible para asegurar los pacientes no reciben infecciones u otras enfermedades de transmisión.

Limpieza manual (siempre desgaste protección guantes, batas, escudos de cara o gafas y cubierta la cabeza)

1. Enjuagar los instrumentos inmediatamente después de su uso.
2. Utilizar un pincel de matorral bajo agua corriente para eliminar todas las sangre y tejidos de las superficies y en las articulaciones.
3. En un receptor o cuenca, mezcla  $\frac{1}{4}$  Oz de médicos de enzima de detergente: Super concentrarse por galón de cálido para agua caliente. Sumergir los instrumentos en la solución y permitir en remojo durante al menos 2 minutos. Tiempo puede ser necesario para secado en sangre y suelos orgánicos.
4. Elimine los instrumentos con un pincel o una esponja.
5. Enjuagar los instrumentos bajo el agua, estéril si se dispone de agua y dejar para secar.